

Medical Cabinets and dryers 醫院用消毒式烘乾機 管路烘乾機

Leader Model: LD-D60

- 一、**功能**：熱空氣經過濾器過濾，內循環式恆溫烘乾，專用於呼吸管路及其相關配件使用。
- 二、**運轉操作**：電子自動控制。(微電腦自動控制)



三、規格：

- 1.內容機容量:可置烘乾共70條呼吸管路，9個不鏽鋼網置物網盤。
- 烘乾機外觀尺寸（外部規格）：
高2180mm x 寬1180mm x 深530mm
- 2.清洗機可使用容量（內鍋規格）：
高1500mm x 寬1020mm x 深460mm
- 3. 置物網盤: 高50mm x 寬457mm x 深457mm
- 4. 烘乾溫度設定範圍:無段式安全控制鈕；操作溫度:熱風循環可調室溫至75°C熱風乾燥。
- 5.運轉時間：微電腦定時30—4小時(30分爲一單位)/連續運轉。
- 6. 電源 AC 220V /1P單相/ 10A。含漏電斷路器，含安裝



四. 功能與效益：

- 1.採內循環式恆溫烘乾以增加烘乾效果及時效，內循環設計80%熱氣經絕緣壁再經HEPA filter進入腔室，鼓風機及加熱器需具有安全保護開關。
- 2.具有2套空氣加熱循環風扇轉速100 CFM 強勁風力可加速烘乾；需具
有前置濾網及HEPA filter可過濾。(Heapa filter 99.97%。)0.3Micro微生物細菌並阻絕空氣中之塵埃和細菌。



LEADER ULTRASONIC CO., LTD.

Medical Cabinets and dryers

醫院用消毒式烘乾機

管路烘乾機

Leader Model: LD-D60

五、構造：

1. 不銹鋼內外層設計，主體採不銹鋼板材質製造，機體材質：不鏽鋼sus304材質。
2. 透明門設計：熱絕緣透明雙門式方便使用者目視烘乾物
直接檢視烘乾效果，避免開門檢視而浪費時間、能源及效率。
3. 進氣過濾系統：具前過濾器和Heapa過濾器，經sgs 認證，可過濾0.3Micro微生物細菌達99.97%阻絕空氣中之塵埃和細菌。(Heapa filter 99.97%。)
4. 熱風循環：雙加熱循環風扇。有兩套空氣加熱循環風扇Blower轉速100 CFM強勁風力可加速烘乾。
5. 熱絕緣透明雙門設計。
6. 安全裝置：過熱斷電警報系統。
7. 重量：約120公斤。



六、附件

1. 管路固定架:35孔* 2個。
2. 不鏽鋼置物網盤:不銹鋼烘乾籃:(高50mm x 寬457mm x 深457mm)* 9個。
3. 2個盛水盤。
4. 前置濾網及HEPA filter過濾網*各1個。
5. 保固證明書、操作手冊、維修手冊、線路圖、出廠證明、出場測試報告書各3份。。

七、保固：保固整體3年。

2. 定期保養：保固期限內每2個月定期保養檢測乙次且需提供預定保養時程，並提供正式保養紀錄給使用單位。

產地: Made in Taiwan

製造廠商:力多超音波有限公司

廠牌：leader

雙門式



LEADER ULTRASONIC CO., LTD.

Medical Cabinets and dryers





醫院用管路烘乾機



管路烘乾機



管路烘乾機單門式

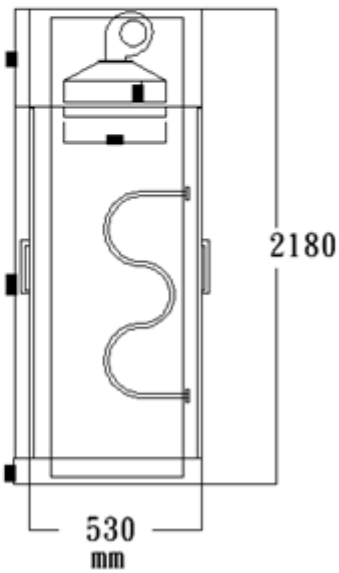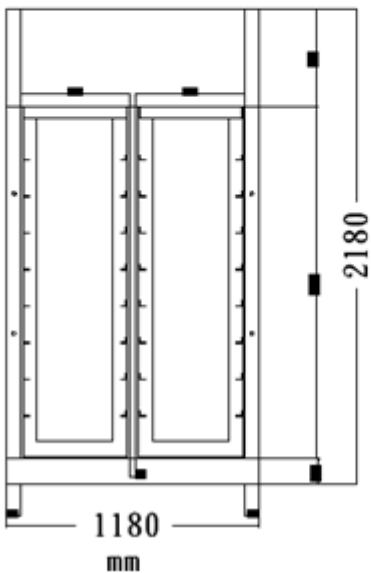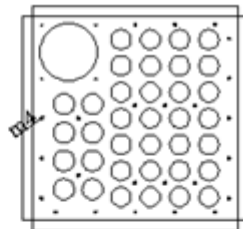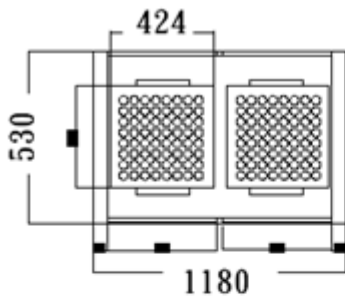

呼吸管乾燥




LEADER ULTRASONIC CO., LTD.

Medical Cabinets and dryers

醫院用消毒式烘乾機

管路烘乾機

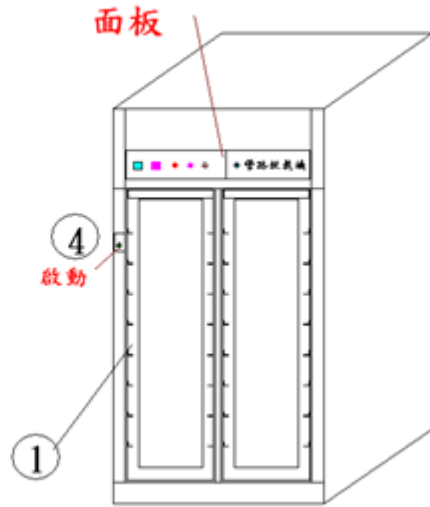


操作步驟(操作方法):

- 1.將門關上。
- 2時間設定：時間設定：0-999.9分自由設定。
75分
- 3.烘乾溫度：設定溫度：溫度30-75°C自由設定。
(請設定在75°C)
- 4.按啓動開關：機器自動運轉、當溫度
到達設定溫度時、停止加熱；當時間到達
設定時間時、自動停止運轉。
- 5.停止按鈕：當欲緊急停止時、將電源開關閉
即可
停止運轉。
- 6.當時間到達設定時間時、自動停止運轉。並
亮完成指示燈。
7. 過熱時會警報 並停止運轉。等待
溫度降至75°C時會自動恢復運轉。
8. 使用完畢、關掉電源、並將籃網清潔乾淨。
9. 機器異常時、請洽詢本公司服務部門、排除
故障後、再行開機。
10. 爲使烘乾效率提高、當未烘乾管路時、請
將塑鋼管插入管路孔、並將
烘乾籃網上放 以減短烘乾時間。
11. HEPA過濾網、每年需更換一次、一次更換
一片。
- 12.整台機器 請勿沖水，包括面板、底盤、上
蓋。
機器異常時、請洽詢本公司服務部門、排除故
障後、再行開機。
服務電話: 02-2658-1515 02-2658-7801 行
動:0932-677-083 黃盈盛

附件

- 1.)烘乾機*1台
 - 2.)管路架*2個
 - 3.)初級及99.97%過濾網*各1
個
 - 4.)不銹鋼烘乾籃*9個；2個盛
水盤。
- 備註:
*1.管路架35個卡槽尺寸:
424*424*60 mm 共2個

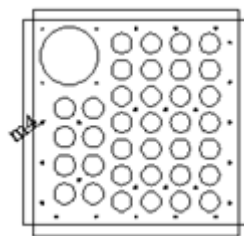

*3Hepa filter尺寸:400*400*70
mm。



LEADER ULTRASONIC CO., LTD.